

AUGEN-NOTFALLPLAN



1 Bestimmen Sie den Schadstoff	2 Wählen Sie die richtige Flasche und Spüllösung	3 Setzen Sie die Spülung fort	4 Spülen Sie wie angegeben
Fremdkörper z.B. Staub, Schmutz, Metall- und Holzsplitter	Augenspüllösung	Augenspüllösung	Solange spülen, bis die Fremdkörper herausgespült sind.
Säuren	Neutralisierende Augenspüllösung	Augenspüllösung	Augen mit Neutralisierende Augenspüllösung spülen, bis die Flasche entleert ist. Die Spülung mit der Augenspüllösung bis zur ärztlichen Behandlung fortsetzen.
Alkali	Neutralisierende Augenspüllösung	Augenspüllösung	Augen mit Neutralisierende Augenspüllösung spülen, bis die Flasche entleert ist. Die Spülung mit der Augenspüllösung bis zur ärztlichen Behandlung fortsetzen.
Andere Chemikalien (z.B. Lösungsmittel und Öle)	Augenspüllösung	Augenspüllösung	Augen solange spülen, bis das unangenehme Gefühl nicht mehr spürbar ist. Die Spülung mit der Augenspüllösung bis zur ärztlichen Behandlung fortsetzen.



Wichtig!

Bei allen Schäden soll das Auge mit einem weichen und gleichmäßigen Strahl gespült werden. Die Augenspüllflasche während des Spülvorgangs nur leicht zusammendrücken. Ärztlicher Rat ist bei jeder Augenverletzung oder Verschmutzung einzuholen. Die Spülung sollte während des Transports zum Arzt fortgeführt werden.